



Nastavení účtu na vg.vivachek.com

1. Vytvořte si účet na stránce: <https://vg.vivachek.com/html/login.html>

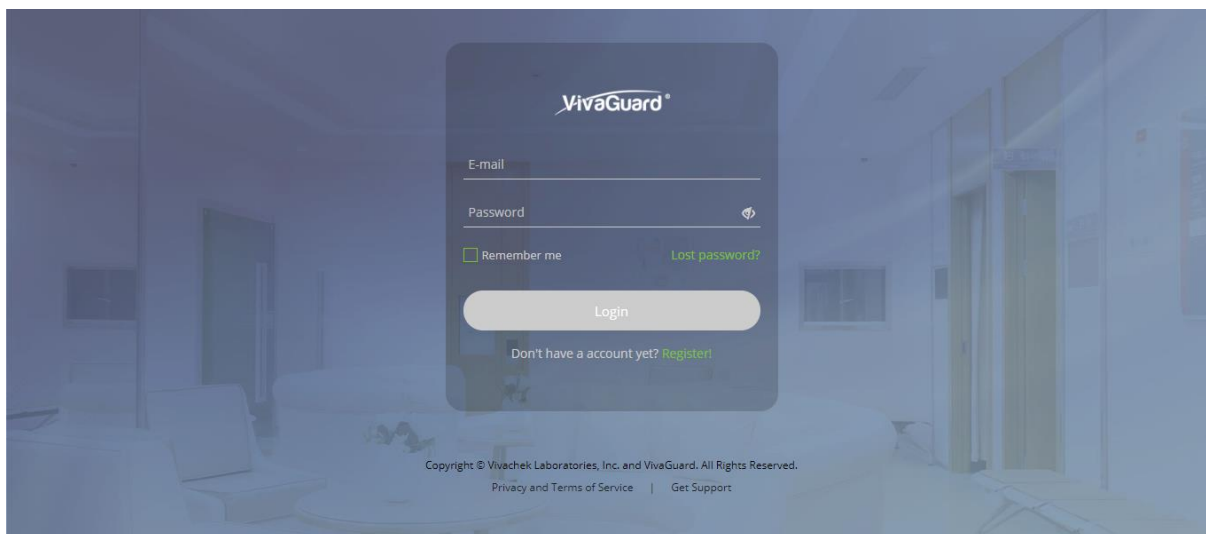

Zmáčknete na ikonku „Register!“

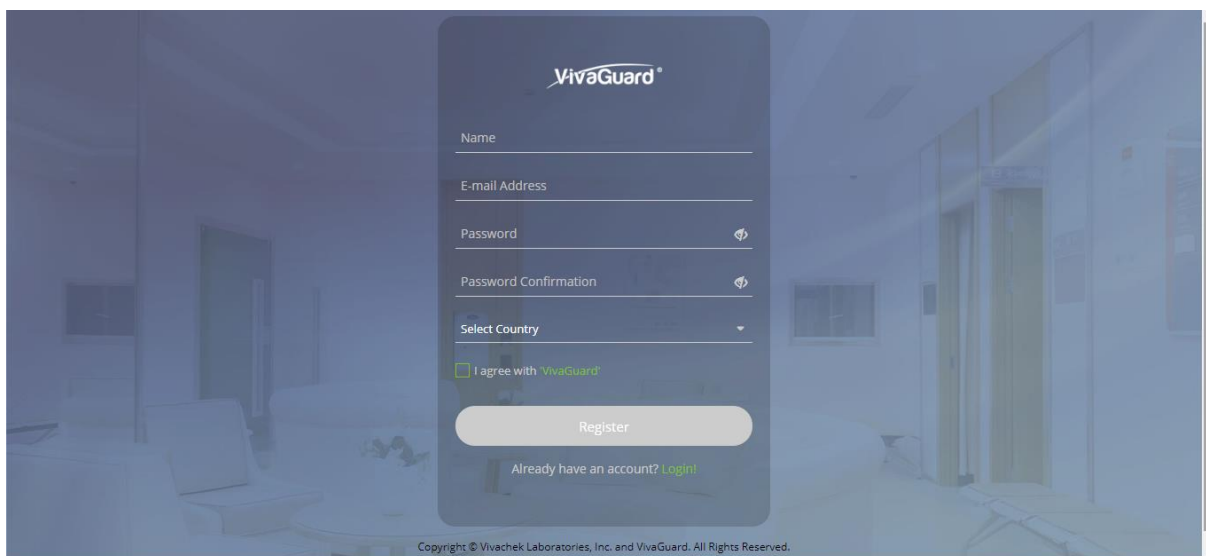

Vyplňte:

- jméno (name)
- email (email address)
- heslo (password) + potvrzení hesla (password confirmation)
- Zemi (region/country)

Potvrdíte souhlas VivaGuard („I agree with VivaGuard“)

Dáte registrovat.

Na email Vám přijde registrační email, který musíte verifikovat, aby přihlášení do účtu proběhlo úspěšně!

Hi ☺

Help us secure your VivaGuard account by verifying your email address

. This lets you access all of VivaGuard's features.

[Verify email address](#)

Button not working? Paste the following link into your browser:

<https://vg.vivachek.com/api/sys/active/1D7694EE04A33BC36813A00E9DF1C2D9>

You're receiving this email because you recently created a new VivaGuard account or added a new email address. If this wasn't you, please ignore this email.

Po přihlášení se Vám otevře aplikace, spravující Vaši hladinu glukózy v krvi.

Copyright © Vivachek Laboratories, Inc. and VivaGuard. All Rights Reserved.
VivaGuard Privacy and Terms of Service | Get Support

Pro přidání pacienta je potřeba zaslat mu „Kód pozvánky“ (Invitation codes).

Rozkliknete si záložku „Kód pozvánky“ (Invitation codes).

Invitation codes

Invitation codes	Use	Creation Time	Action
JNWCVC	used	2020/06/11 10:49:29	Edit
J4GJLU	used	2020/06/11 09:29:27	Edit

page 1 of 1

Zadáte email, který Vám pacienta poskytł, jako jeho registrační email v prohlížeči care.vivachek.com.

Můžete připojit i „Poznámku“ (Remarks).

Pro odeslání kliknete na „Ano“ (Yes).

Jakmile Vám pacient odsouhlasí sdílení dat pomocí pozvánky, objeví se Vám v záložce „Moji pacienti“ (My patients).

Copyright © Vivachek Laboratories, Inc. and VivaGuard. All Rights Reserved.
"VivaGuard" Privacy and Terms of Service | Get Support

Jakmile kliknete na jméno pacienta, zobrazí se Vám jeho profil, kde je uveden přehled měření.

Copyright © Vivachek Laboratories, Inc. and VivaGuard. All Rights Reserved.
"VivaGuard" Privacy and Terms of Service | Get Support

Pomocí symbolu pro PDF je možné vygenerovat si PDF s výsledky pacienta.

Logbook: 2020/05/01 - 2020/06/30



Name: I
DOB:
Gender: Male
Clinician/Doctor:

Overall Target: 4.4-10.0 mmol/L
Before Meal Target: 4.4-10.0 mmol/L
After Meal Target: 4.4-10.0 mmol/L

Logbook	Midnight	Before Breakfast	After Breakfast	Before Lunch	After Lunch	Before Dinner	After Dinner	Bedtime
2020/05/05 Friday			55.0 @ 09:23 AM					
2020/05/06 Saturday			4.1 @ 08:20 AM					
2020/05/08 Thursday			5.8 @ 11:04 AM	16.0 @ 11:17 AM				