



## Nastavení aplikace care.vivachek.com

1. Vytvořte si účet na stránce: <https://care.vivachek.com/login.html?lng=cs-CZ>

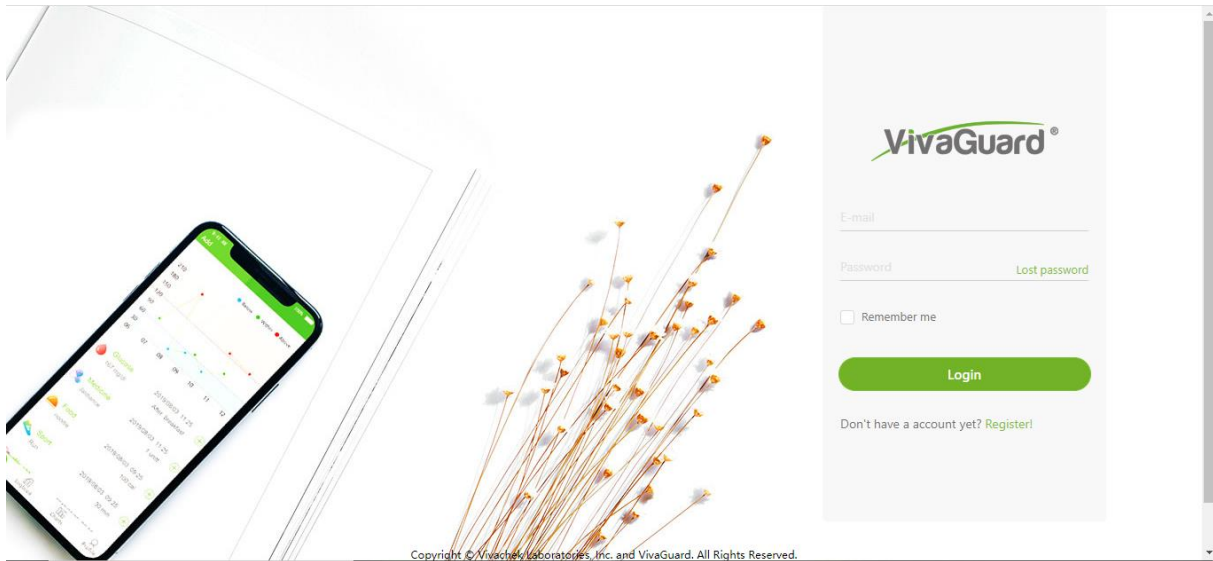

Zmáčknete na ikonku „Register!“

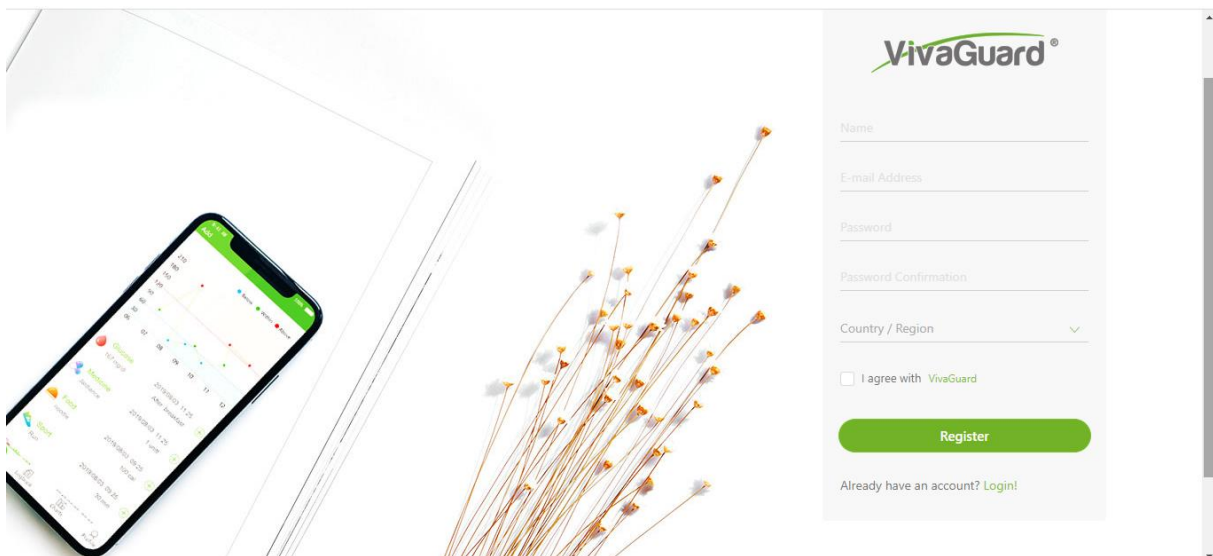

**Vyplníte:**

- jméno (name)
- email (email address)
- heslo (password) + potvrzení hesla (password confirmation)
- Zemi (region/country)

Potvrdíte souhlas VivaGuard („I agree with VivaGuard“)

Dáte registrovat.

**Na email Vám přijde registrační email, který musíte verifikovat, aby přihlášení do účtu proběhlo úspěšně!**

Hi ☺

Help us secure your VivaGuard account by verifying your email address

. This lets you access all of VivaGuard's features.


[Verify email address](#)

Button not working? Paste the following link into your browser:

<https://vg.vivachek.com/api/sys/active/1D7694EE04A33BC36813A00E9DF1C2D9>


You're receiving this email because you recently created a new VivaGuard account or added a new email address. If this wasn't you, please ignore this email.

Po přihlášení se Vám otevře aplikace, spravující Vaši hladinu glukózy v krvi.

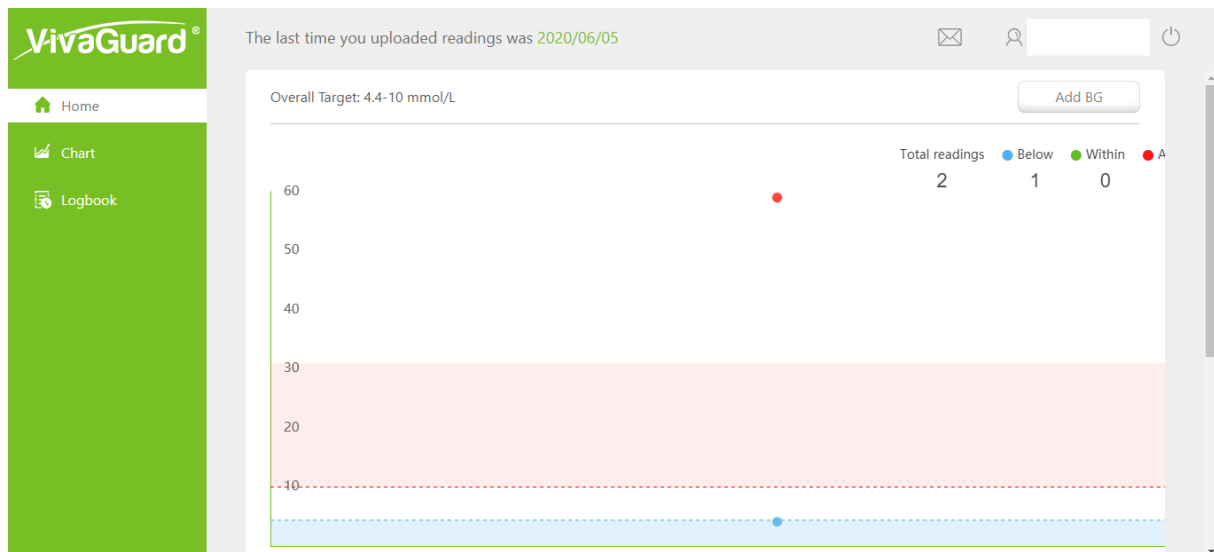


V první řadě je důležité si nainstalovat ovladač pro připojení Vašeho glukometru do PC.


1. Stáhněte si ZIP soubor z adresy <https://www.vivachek.cz/files/vivaguard.zip>

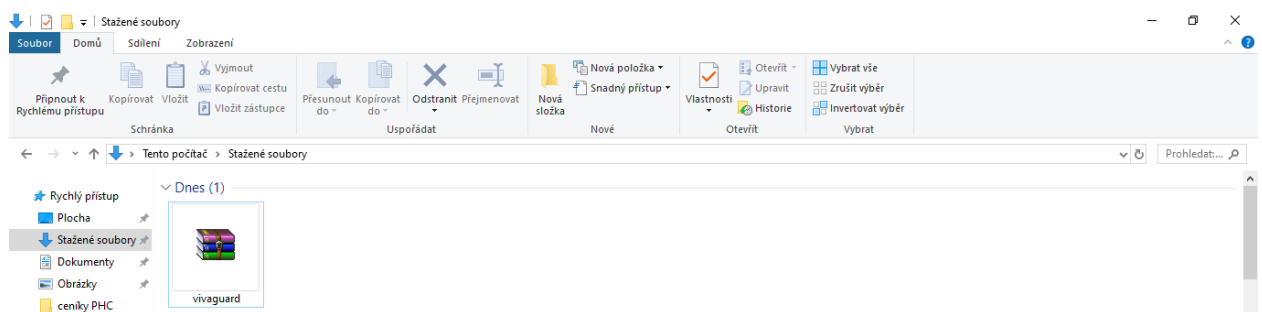


2. Rozbalte ZIP soubor

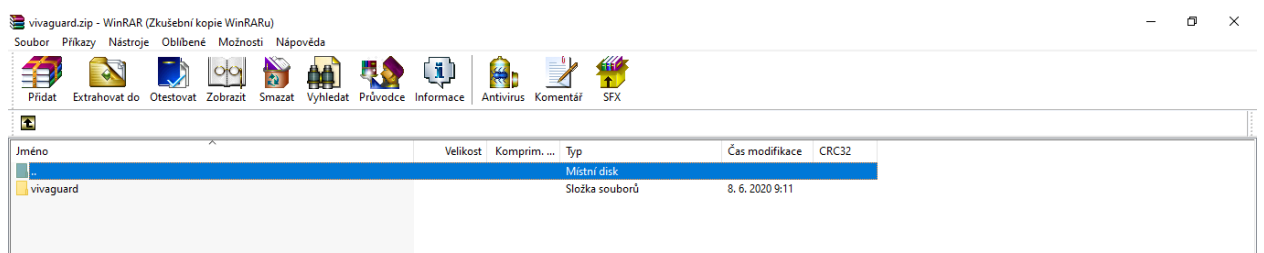


Otevřít soubor ze stahování, označit složku vivaguard a zvolit Extrahovat vše

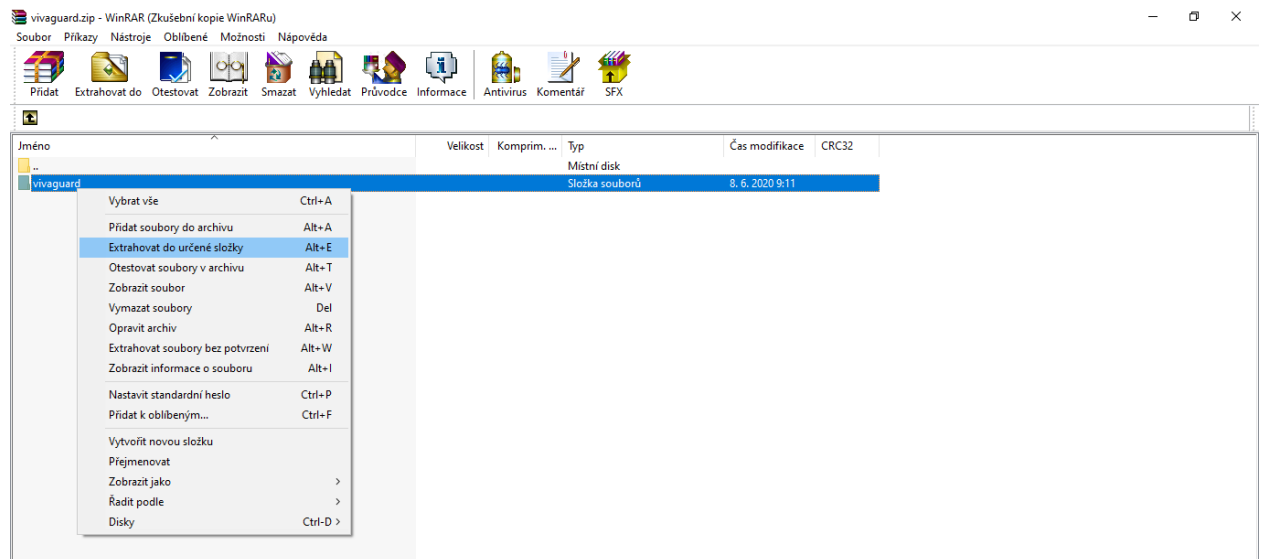


3. Přejděte do složky kam jste ZIP rozbalili, nejčastěji do složky Stažené (např. C:\Users\jaroslav.bouska\Downloads\vivaguard)

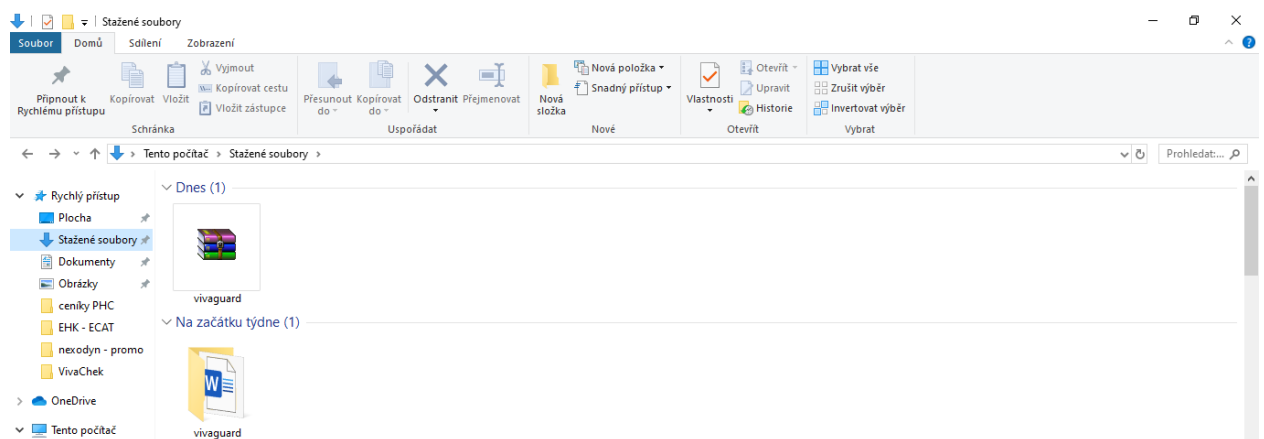

4. Připojte glukometr kabelem a zapněte jej – tlačítko nahoře
5. Ovladače by se měli nainstalovat automaticky samy. Pokud však něco selže, Windows vám vyhodí chybu, že nelze ovladače nainstalovat.
6. Otevřete tedy složku Ovladač a spusťte soubor CP210xVCPInstaller\_x64

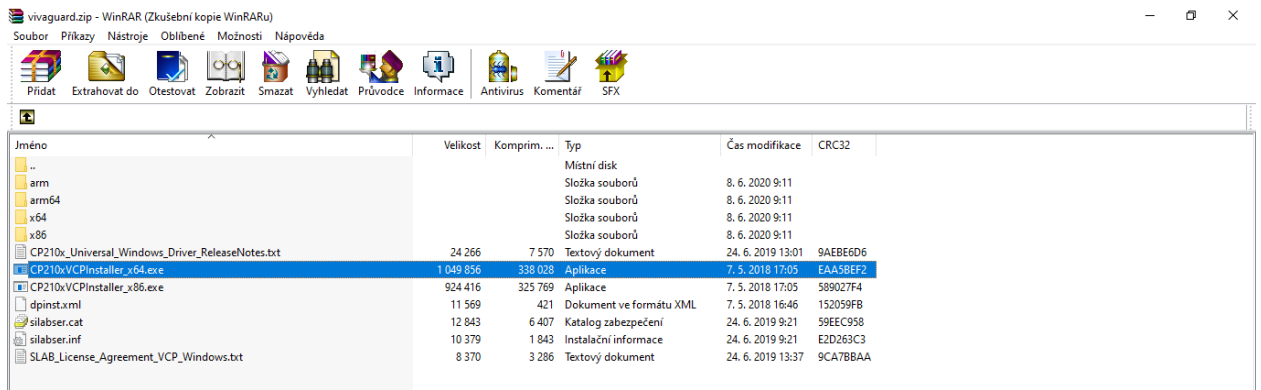

7. Resetujte počítač.
8. Připojte glukometr kabelem a zapněte jej – tlačítko nahoře
9. Otevřete složku Aplikace a spusťte GlucoWellUpdateTool. Aplikace najde glukometr a bude vyžadovat přihlášení uživatele do účtu na webu <https://care.vivachek.com/>

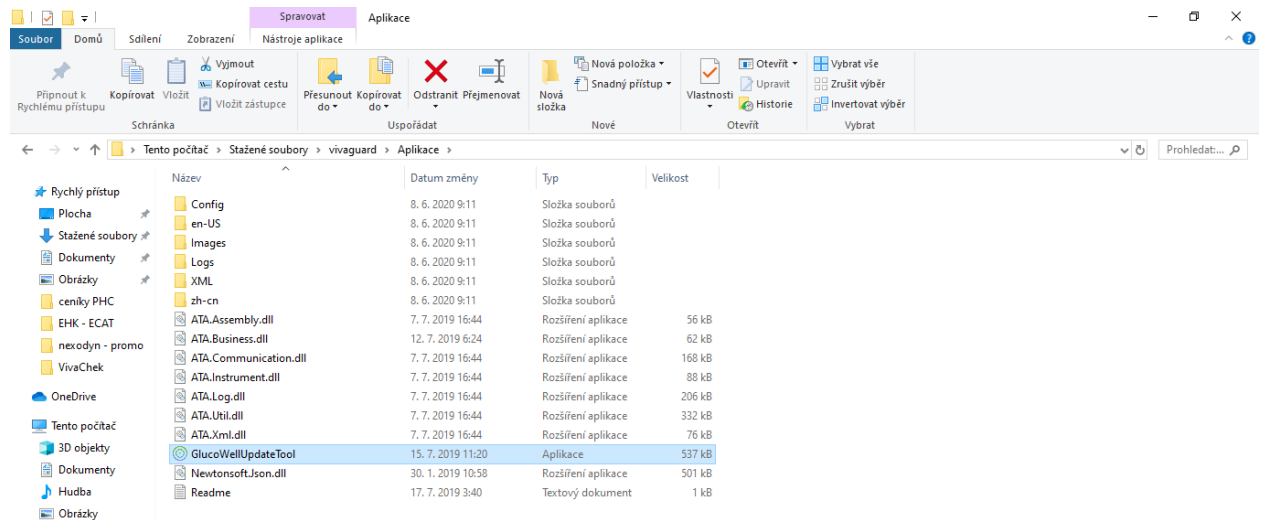


Jakmile máte ovladač nainstalovaný, můžete Váš glukometr připojit k Vašemu PC. Aplikace si automaticky stáhne Vaše naměřená data.

### Sdílení dat s Vaším lékařem

Sdílení dat s Vaším lékařem je možné 2 způsoby.

1. Samy vygenerujete PDF Vašich výsledků dle požadavků (časové rozmezí) Vašeho ošetřujícího lékaře a pošlete/předáte jej svému lékaři. (záložka „zmapovat“ (chart) a zmáčknete na tlačítko PDF)

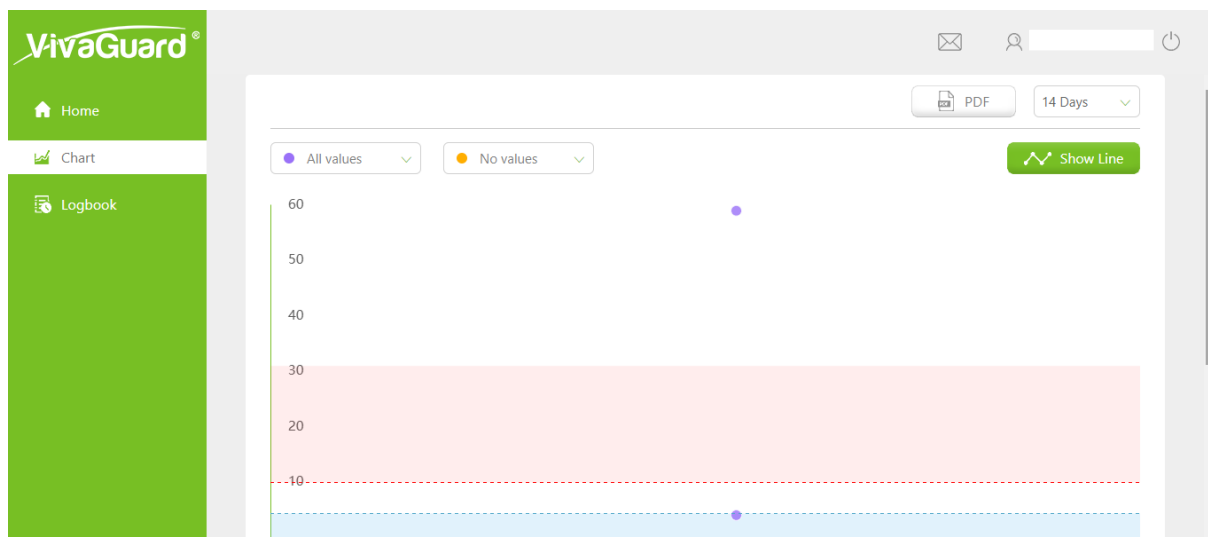

2. Váš lékař Vám pošle pozvánku pro přidání Vašeho účtu s výsledky. Tato pozvánka přijde automaticky na email, na kterém jste registrovaní do aplikace.

Dear VivaGuard User,  
 Thank you for using our service to manage your diabetes.  
 Your doctor or caregiver is using the VivaGuard portal to manage his/her patients.  
 You can add doctor or caregiver's code **J4GJLU** in your VivaGuard App.

We hope our telemedicine service can provide efficient management tools for both doctor/caregiver and users


If you donot have VivaGuard installed in your phone, please search VivaGuard in APP store by Apple or Google Play. .  
 Please ignore this message if you do not plan to use our service.

Your opinion and experience are highly appreciated to us.

VivaGuard Service Team.


**Pro Vás je důležitý kód červeně vyznačený!**

Kliknete na své uživatelské jméno v aplikace. A vstoupíte do sekce „Klinika“ (Clinic).

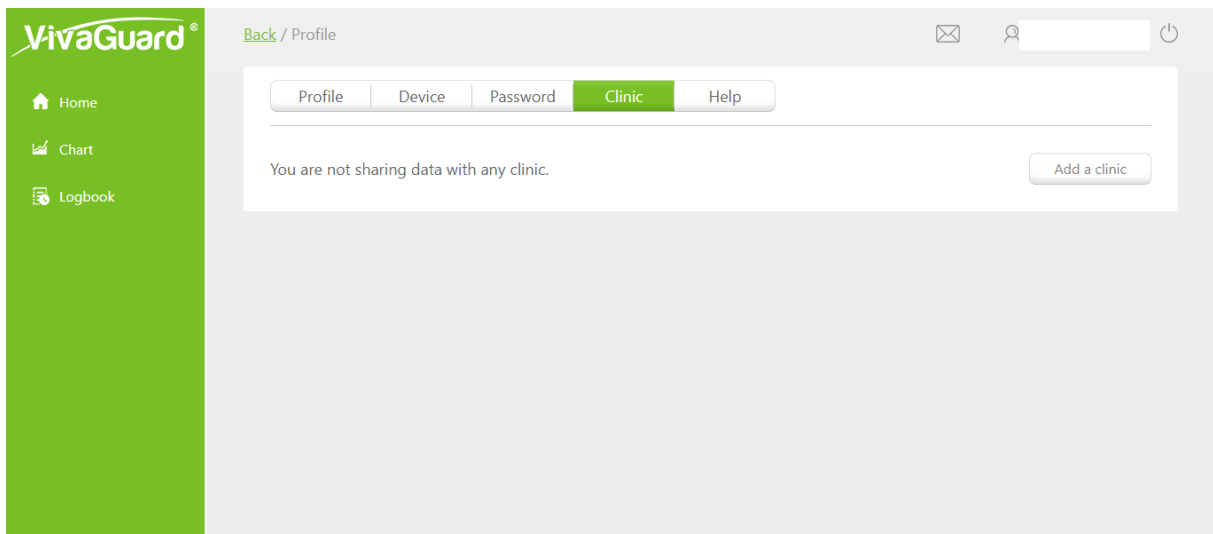


Zakliknete „Přidat kliniku“ (Add a clinic)

Objeví se Vám tato tabulka:

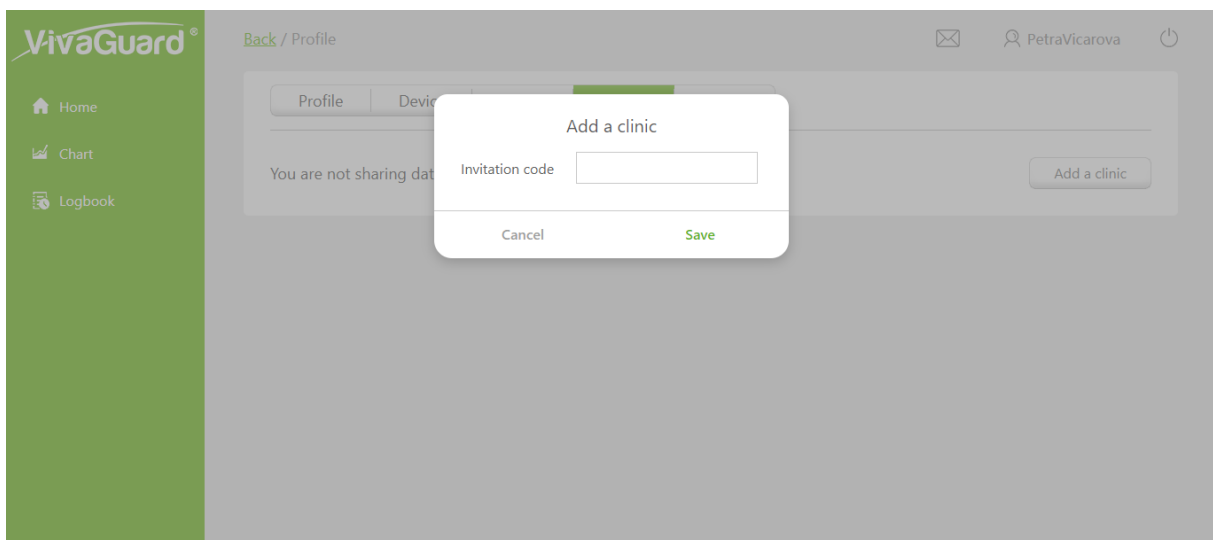

Do ní vložíte již zmíněný červený kód. A dáte „Uložit“ (Save).

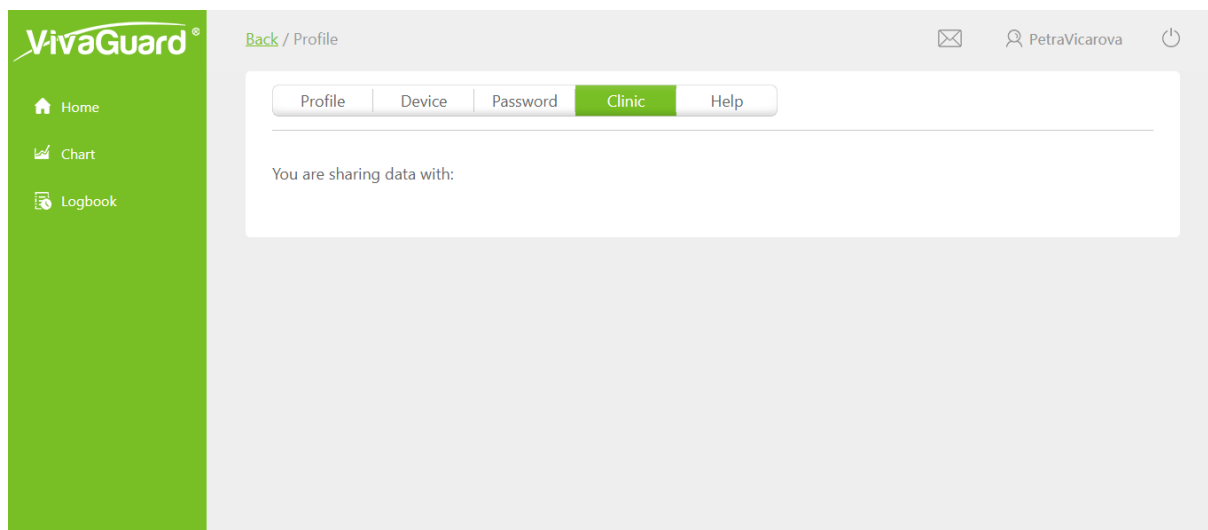

Nyní sdílíte data se svým lékařem, kterému se objevují stejná data v aplikaci jako Vám.

**Formu, v jaké budete poskytovat data svému lékaři, si domluvte přímo ve Vaší ordinaci.**